

再使用禁止

オールワン スプリント カット

【警告】


- 完全に硬化するまで、無理な力や体重をかけたりしないこと。
[本品が変形、破損し、怪我を引き起こす恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 水温26℃以上の水を使用しないこと。
[本品の硬化には発熱を伴うので、水温が高いと本品の温度が高くなります、低温火傷の恐れがあるため。]
- 次の患者には慎重に適用して下さい。
 - 本品の材料に過敏症またはアレルギーの既往歴のある患者。
 - 患部の感染のある患者[感染症が悪化する恐れがあります。]

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

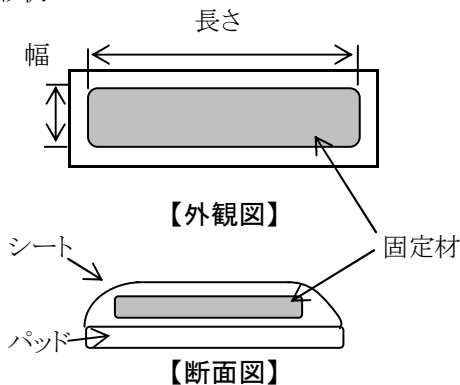

2. 寸法

固定材の寸法		単位: cm
幅	1.0、1.25、2.5、3.75、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0	
長さ	20、25、30、38、50、76、88、114、120	

3. 原理

固定材が水と反応することにより硬化し、被覆して患部を固定することができる。

4. 原材料

固定材 : ポリエステル又はグラスファイバー及びポリウレタン
パッド、シート: ポリエステル

【使用目的、効能又は効果】

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具をいう。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法】

- 患部の大きさと状態に合わせて適当な長さと同幅のものを選ぶ。
- 本品を防湿袋から取り出して、表裏を確認して下さい。フェルトパッド側が患部に接する面です。
- 本品全体を26℃以下の水に10～20秒間水に浸します。

- 本品を水から取り出し、絞って余分な水分を切ります。
- 本品のパッド部を患部に適合するよう形を整える。
- すばやく包帯等で固定する。
- 施術後20分程度は本品に荷重をかけないで下さい。

【使用上の注意】

- 低温の水を使用すると固定するのに時間がかかる。また、高温の水を使用すると本品が発熱する恐れがある。
- 水に浸した際、余分な水分をとらないと操作性が悪くなり、また固定するのに時間がかかる。
- 完全に硬化する前に、体重をかけたり無理な力を入れないこと。
- 一度硬化したものは使用しないこと。
- 本品に異常を認めめた場合は、直ちに使用を中止すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 常温で保管し、多湿、水濡れ及び直射日光を避けること。
 - 包装に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。本品は大気との接触により硬化しはじめる。
 - 本品に記載してある有効期間を確認し、有効期間を過ぎたものは廃棄すること。
 - カット後に箱に残ったものを保管する際は専用クリップでしっかり封をし、クリップが外れないようにすること。
2. 有効期間
適切な方法で貯蔵・保管する時、有効期間は製造日より3年間

【包装】

- 1 袋 1個入り
1 個/箱、5 個/箱、10 個/箱

【主要文献及び文献請求先】

日本ヒューマンメディック株式会社
電話: 097-549-4140 FAX:097-549-7470

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

(1) 製造販売業者:

日本ヒューマンメディック株式会社
〒870-0848 大分県大分市賀来北2-16-34
電話: 097-549-4140 FAX:097-549-7470

(2) 製造業者:

T&L Co.,Ltd. 韓国
T&L (Jiaying) Co.,Ltd. 中華人民共和国

(3) 緊急連絡先: 日本ヒューマンメディック株式会社

電話: 097-549-4140 FAX:097-549-7470