

販売名 : オールワン スプリント ロール

再使用禁止

【警告】


- 完全に硬化するまで、無理な力や体重をかけたりしないこと。
[本品が変形、破損し、怪我を引き起こす恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 水温26℃以上の水を使用しないでください。
[本品の硬化には発熱を伴うので、水温が高いと本品の温度が高くなります、低温火傷の恐れがあるため。]
- 次の患者には慎重に適用してください。
(1) 本品の材料に過敏症またはアレルギーの既往歴のある患者。
(2) 患部の感染のある患者[感染症が悪化する恐れがあります。]

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

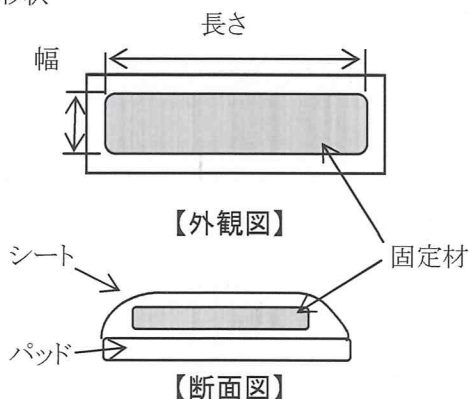

2. 寸法

固定材の寸法 単位: cm

幅	2.5、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0、17.5
長さ	120、450

3. 原理

固定材が水と反応することにより硬化し、被覆して患部を固定することができます。

4. 原材料

固定材 : ポリエステル又はグラスファイバー及びポリウレタン
パッド、シート: ポリエステル

【使用目的、効能又は効果】

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具です。本品は単回使用です。

【操作方法又は使用方法】

- 患部の大きさと状態に合わせて適当な幅のものを選び、必要な長さを箱から引き出し、アルミパックごとはさみでカットしてください。
- カット後、直ちに箱に残った本品の端を数cm折返し、アルミパックの端を専用クリップでしっかり封をしてください。
- 本品を防湿袋から取り出して、表裏を確認してください。フェルトパッド側が患部に接する面です。
- 本品全体を26℃以下の水に10～20秒間水に浸します。

- 本品を水から取り出し、絞って余分な水分を切ります。
- 本品のパッド部を患部に適合するよう形を整えてください。
- すばやく包帯等で固定してください。
- 施術後20分間程度は本品に荷重をかけないでください。

【使用上の注意】

- 低温の水を使用すると固定するのに時間がかかる。また、高温の水を使用すると本品が発熱する恐れがあります。
- 水に浸した際、余分な水分をとらないと操作性が悪くなり、また固定するのに時間がかかります。
- 完全に硬化する前に、体重をかけたり無理な力を入れないでください。
- 一度硬化したものは使用しないでください。
- 本品に異常を認めめた場合は、直ちに使用を中止してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 常温で保管し、多湿、水濡れ及び直射日光を避けてください。
- 包装に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱ってください。本品は大気との接触により硬化しはじめます。
- 本品に記載してある有効期間を確認し、有効期間を過ぎたものは廃棄してください。
- カット後に箱に残ったものを保管する際は専用クリップでしっかり封をし、クリップが外れないようにしてください。

2. 有効期間

適切な方法で貯蔵・保管する時、有効期間は製造日より3年間

【包装】

- 1 袋 1枚入り
- 1 箱 1ロール入り

【主要文献及び文献請求先】

日本ヒューマンメディック株式会社
電話: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

(1) 製造販売業者:

日本ヒューマンメディック株式会社
大分県大分市賀来北2丁目16番34号
電話: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470

(2) 製造業者:

T&L Co.,Ltd. 韓国
T&L(Jiaxing) Co.,Ltd. 中華人民共和国

(3) 緊急連絡先: 日本ヒューマンメディック株式会社

電話: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470